

PROTOCOLLO DIME CHIRURGICHE PARZIALI

- 1) INVIARE AD APOTEA LA TAC apotelesas@gmail.com
- 2) INVIARE AD APOTEA I MODELLI (SUP. ed INF.)
I MODELLI ANDRANNO SCANSIONATI PER ACCOPPIARLI ALLA TAC.
IN CASO D'IMPRONTE DIGITALI INVIARE I DATI AD APOTEA PER E-MAIL.
PER AVERE UN BUON ALLINEAMENTO OCCORRONO UN MINIMO DI 3 ELEMENTI DENTALI STABILI E DISPOSTI UNIFORMEMENTE LUNGO LA CRESTA DENTALE, ALTRIMENTI BISOGNA CREARE UNA DIMA RADIOLOGICA, CHE DOVRA' ESSERE IN SITU DURANTE LA FASE TAC DEL PAZIENTE.
- 3) (OPZIONALE) CERATURA DI DIAGNOSI CHE PUO' ESSERE FORNITA IN CERA ASSIEME AI MODELLI O IN VIRTUALE E SPEDITA PER E-MAIL AD APOTEA.
APOTEA IN CASO DI RICHIESTA PUO' FORNIRE LA CERATURA VIRTUALE CON UN COSTO EXTRA ALLA DIMA DI 5,00 € AD ELEMENTO DENTALE.

PROTOCOLLO DIME CHIRURGICHE EDENTULIA TOTALE

1) INVIARE AD APOTEA LA TAC apoteasas@gmail.com.
IN CASO DI EDENTULIA TOTALE IL PAZIENTE DEVE
ESEGUIRE LA TAC CON UNA MASCHERINA
RADIOLOGICA.


LA MASCHERINA RADIOLOGICA E' INDISPENSABILE
ANCHE IN TUTTI QUEI CASI DOVE NON ABBIAMO
REPERI CERTI A SUFFICIENZA PER ALLINEARE IL
MODELLO AL 3D DELLA TAC.

PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA DIMA
RADIOLOGICA SI PUO' USARE:

a) LA DUPLICAZIONE DI UNA PROTESI GIA'
ESISTENTE "**E' BENE ESEGUIRE UNA RIBASATURA
PRIMA DELLA DUPLICAZIONE**"

b) COSTRUIRE, EX NUOVA, LA DIMA DA MODELLO
DEL PAZIENTE

N.B. IN ENTRAMBI I CASI FONDAMENTALE E'
L'APPOSIZIONE DI REPERI RADIO OPACHI COME
IN FOTO

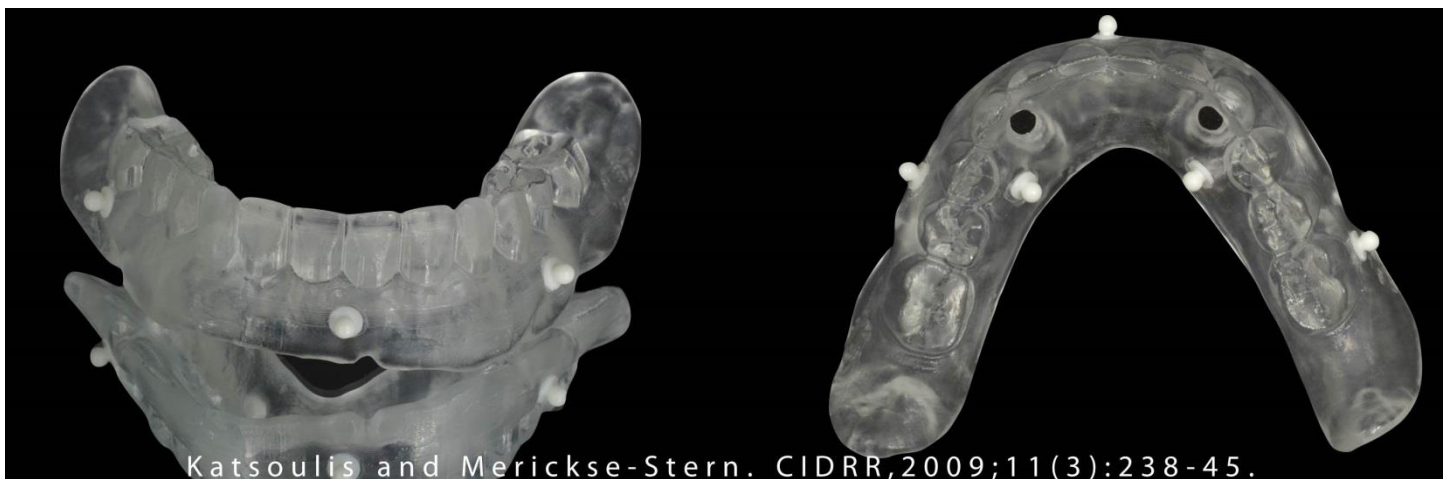

**N.B. LA DIMA RADIOLOGICA PRIMA DI CONSEGNARLA
AL PAZIENTE VA SCANSIONATA SINGOLARMENTE
SOPRA E SOTTO ED IN POSIZIONE SUL MODELLO**

**2) INVIARE AD APOTEA I MODELLI (SUP. ed INF.) E LA
DIMA RADIOLOGICA.**

**I MODELLI E LA DIMA RADIOLOGICA ANDRANNO
SCANSIONATI PER ACCOPPIARLI ALLA TAC.**

**IN CASO DI DATI DIGITALI INVIARE I DATI AD APOTEA
PER E-MAIL.**

RECAPITI APOTEAsas:

E-MAIL: apoteasas@gmail.com

**indirizzo: APOTEA SAS
Via Dell'Industria, 241
62014 CORRIDONIA (MC)**