

ESTRATTORI FILETTATI



CC01



CC02



CC03

ESTRATTORI PER COMPONENTI PROTESICHE

Gli estrattori sono strumenti ideati e realizzati per sbloccare le componenti protesiche che sfruttano l'accoppiamento conico - esagonale interno agli impianti sommersi tipo VC - TC.

I monconi che richiedono l'uso dell'estrattore sono evidenziati da una scritta che riporta tale necessità.

ISTRUZIONI D'USO DEGLI ESTRATTORI

Svitata la vite protesica, si inserisce al posto di questa l'estrattore avvitandolo nel moncone senza forzare. Dopo pochi giri il moncone si sblocca e può essere facilmente estratto.